



Enkel att använda



Kan låsas med ett mynt

KOALA

POSITIONERINGSSTÖD

- ENKEL ATT ANVÄNDA
- SNABB ATT MONTERA
- KAN LÅSAS

Den nya bältserien Koala erbjuder tack vare sin geniala uppbyggnad det överlägsna stödet för en rörelsehindrad person i bil och i rullstol.

Fempunkts Pilot-låset gör det möjligt att fästa tungorna i olika takt. Axelremmarna kan steglöst justeras för att passa personer i olika storlekar. Låset kan vid behov även låsas med ett mynt.

Bältserien används tillsammans med bilens egna säkerhetsbälten. Pat. ans. nr. 20125231

Tillverkare:



Autovi Systems Oy
Rovaniemi • Finland
www.autovi.com

Försäljning:



Kan låsas



BRUKSANVISNING

OBS! Använd alltid bilens eget säkerhetsbälte med Koala bältesserien.

Fäst den medföljande säkerhetsbälteskäraren på instrumentbrädet



1.

Öppna paketet. Ta ut bältet och öppna vecken.



2.

Öppna det övre låset.



3.

För den nedre remmen bakåt under säkerhetsstödet.



4.

Placera den övre remmen under nackstödet och förena låset bakom ryggstödet.



5.

Spänn bältet till lämplig längd på baksidan.



6.

Öppna låsen framtill.



7.

Avlägsna monteringspaffen.



8.

Justera remmarna till lämplig längd. Nu är bältet redo att användas.



Autovi Systems Oy
Rovaniemi • Finland
www.autovi.com